

Rev. 00  
Ottobre 2015



# Scheda tecnica

TC-002

Termoforo elettrico standard



| Codice | Descrizione   |
|--------|---|
| TC-002 | Termoforo elettrico standard 100 W. Dimensioni 41 x 53 cm |

| Indicazioni |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Produttore  | Wellcare Co., Ltd per INTERMED S.r.l. |

## Indicazioni

Termoforo riscaldante che trasmette i benefici del calore, adatto a molteplici applicazioni.

## Descrizione

Termoforo elettrico da 100 W con 4 livelli di temperatura selezionabili, con funzione riscaldamento rapido e timer di spegnimento automatico dopo 90 min.

Fodero in tessuto Velour di poliestere molto confortevole e traspirante

## Caratteristiche tecniche

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Potenza:</b>       | 100 W  |
| <b>Temperatura:</b>   | Commutatore elettrico a 4 temperature: pos. 0 = Apparecchio spento<br>pos. 1 = Calore minimo<br>pos. 2 e 3 = Calore medio<br>pos. 4 = Calore massimo |
| <b>Alimentazione:</b> | 230 V – 50 Hz  |
| <b>Dimensioni:</b>    | 41 x 53 cm   |

**INTERMED s.r.l.**

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Controindicazioni e avvertenze

### QUESTO APPARECCHIO NON È IDONEO AD UN USO OSPEDALIERO

- Collegare solo con la tensione indicate in etichetta.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato quando piegato, sgualcito o strappato.
- Non utilizzare come un lenzuolo o posizionare il termoforo sotto il materasso.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e da altre persone con allergie particolari al calore e incapaci di reagire al surriscaldamento.
- Non utilizzare il termoforo su persone che non possono muoversi senza aiuto, bambini piccoli, persone insensibili al calore e animali.
- Persone che possono risentire del calore oltre misura devono utilizzare il termoforo solo in presenza di personale qualificato.
- Attenzione! Mai addormentarsi mentre il dispositivo di è in funzione.
- L'uso prolungato può provocare problemi alla pelle.
- Non bucare l'apparecchio con aghi, spilli o altri oggetti appuntiti.
- Non tirare o torcere il cavo di alimentazione.
- Evitare il contatto dell'interruttore e del cavo di alimentazione con liquidi o fonti di umidità.
- In caso di danneggiamento del cavo o dell'interruttore, al fine di evitare situazioni di pericolo, rivolgersi a personale qualificato e autorizzato per riparazione e/o sostituzione dello stesso.
- Non utilizzare l'apparecchio se umido o bagnato.
- Il dispositivo non può essere acceso tramite un interruttore a tempo.
- L'interruttore non deve essere collocato sopra o sotto l'apparecchio o coperto quando l'apparecchio è in uso.
- Evitare di piegare eccessivamente il termoforo.

### Durante il funzionamento dell'apparecchio:

- ✓ Non appoggiare sopra il termoforo oggetti grandi o pesanti (valigie etc.).
- ✓ Non posizionare altre fonti di calore sopra il termoforo, (borse dell'acqua calda, cuscini termici o simili).
- ✓ Non posizionare l'interruttore sotto le coperte o il cuscino durante il funzionamento.
- Non ripiegare il termoforo quando è caldo.
- Esaminare l'apparecchio di frequente per rilevare usura o danni. Se il termoforo è stato utilizzato in modo improprio o non funziona correttamente rivolgersi a personale qualificato e autorizzato per riparazione e/o sostituzione dello stesso.
- Evitare che i bambini utilizzino lo strumento.
- In caso di utilizzo da parte di minori, procedere solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare con bambini di età inferiore a tre anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra degli 8 anni di età. Nel caso di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali si consiglia l'utilizzo solo se supervisionati o istruiti all'uso e ai rischi relativi ad un uso improprio. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. La pulizia e il mantenimento dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Quando l'apparecchio è utilizzato per un lungo periodo (durante il sonno), il commutatore deve essere regolato in posizione 1.
- L'unità di controllo e il commutatore, non devono essere bagnati durante la pulizia, il cavo deve essere posizionato in modo da garantire che l'acqua non scorra nel
- commutatore di controllo.

### INTERMED s.r.l.

Quando l'apparecchiatura non è in uso:

- ✓ Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo e di piegarlo.
- ✓ Non appoggiare sopra il termoforo oggetti grandi o pesanti (valigie etc.) quando non è in uso.

Questo dispositivo di riscaldamento deve essere utilizzato solo con il tipo di alimentatore indicato. Usare con l'alimentatore 102B2 per TC-001, 102C2 per TC-002 e 102C1 per TC-003.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto preferibilmente dentro la sua confezione originale. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Prima di procedere alle operazioni di pulizia accertarsi che il termoforo non sia collegato alla presa elettrica. Si prega di fare attenzione ai simboli riportati sull'etichetta di lavaggio.

- ✓ Non lavare a secco
- ✓ Non usare candeggina
- ✓ 40°C programma delicato di lavaggio
- ✓ 30°C programma extra delicato di lavaggio
- ✓ Stirare a bassa temperatura
- ✓ Lavaggio a secco
- ✓ Non lavare a secco
- ✓ Non stirare

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

24 mesi per difetto di fabbricazione

### INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142